

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...). Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée. Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit. Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente. Conduite déconseillée.

La date de fabrication est incluse dans le numéro de lot, qui apparaît sur l'étiquette de l'emballage sous l'intitulé [lot], de la manière suivante : les deuxième et troisième chiffres représentent l'année de fabrication et les quatrième et cinquième représentent le mois.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon neutre (max. 30 °C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas étendre, ne pas repasser et ne pas exposer à des sources de chaleur directes comme les poêles, chauffages, radiateurs, exposition directe au soleil etc. Pendant son utilisation ou son nettoyage, ne pas utiliser d'alcools, de pommades ou de liquides dissolvants. Si l'orthèse n'est pas bien essorée, les résidus de lessive peuvent irriter la peau et détériorer le produit.




- Conserver le produit dans un endroit sec à température ambiante.
- Pour jeter l'emballage et le produit, respectez strictement les réglementations légales de votre région.



PLUS D'INFOS SUR
NOS PRODUITS :
www.orliman.fr



Dispositif médical de classe I
Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes
Pour toutes informations complémentaires, contacter :
SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.
NOT_ReleveurPied_BOXIAPLUS_191007_Orv1 / NUT.047

 ORLIMAN S. L. U.
C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana
Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

Edition : 2019/10



ISO 13485



BOXIA PLUS®

➤ RELEVEUR DE PIED



CONTENU/DESCRIPTION

Un releveur de pied Boxia Plus® :

- 1 sangle de cheville,
- 1 languette avec crochet antidérapant,
- 1 élastique de traction,
- 8 crochets en S.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Paralysies flaccides, paralysies traumatiques et paralysies neurologiques.

COMPOSITION

- Tissu principal : Polyamide 72%, Polyuréthane 28%.
- Sangle de cheville : Polyamide 83%, Élastomère 17%.
- Coussinet : - Extérieur : Coton 57%, Polyuréthane 29%, Polyester 7%, Polyamide 5%, Élastomère 2%.
- Intérieur : Silicone.
- Élastique : Latex 77%, Polyamide 23%.
- Crochets : Acier inoxydable 100%.
- Bande métallique : Acier.
- Composants avec latex et caoutchouc naturel.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE CHEVILLE (CM)
1	14 - 20
2	20 - 26
3	26 - 32

MISE EN PLACE

RÉGLAGE DU PRODUIT :

A (figures 1 et 2)

- Ouvrir la sangle de cheville, la mettre à plat et déscratsher la languette avec la boucle.
- Fixer la boucle dans une des positions entre le premier et le dernier des 4 trous de la sangle de cheville (suivant le tableau)

TAILLE	•	•	•	•
TAILLE	TOUR DE CHEVILLE (CM)			
1	14	16	18	20
2	20	22	24	26
3	26	28	30	32

Guide de réglage en fonction du tour de cheville

NOTE : La boucle doit être fixée de manière à se retrouver bien au milieu de l'avant du tibia.

MISE EN PLACE DE LA LANGUETTE ANTIDÉRAPANTE DANS LA CHAUSSURE :

B (figures 3, 4 et 5)

- Positionner le support antidérapant (avec crochet central dans le sens de la traction) entre la languette de la chaussure et le lacet puis serrer le lacet. Si nécessaire, la redécouper. (fig. 3)

NOTE : Il est possible d'utiliser les crochets en S à la place de la languette. Les introduire dans les œillets en plaçant la partie la plus longue à l'intérieur de la chaussure. (fig. 4 et 5)

MISE EN PLACE DE LA SANGLE CHEVILLE

C (figures 6, 7, 8 et 9)

- Positionner la sangle de cheville en plaçant le coussinet en silicone au niveau du tendon d'Achille. (fig. 6)
- À l'arrière de la cheville, faire pression vers la jambe jusqu'à entendre un « clic ». Le produit se déverrouille et enroule la cheville. (fig. 7)
- Enrouler la double languette autour de la jambe. Vérifier que le crochet antidérapant passe au centre de la languette. (fig. 8)
- Ajuster les deux petites fixations auto-agrippantes afin que la sangle soit réglée de manière optimale. (fig. 9)

MISE EN PLACE DE L'ÉLASTIQUE DE TRACTION

D (figure 10, 11 et 12)

- Enfiler l'élastique de traction dans la boucle de la sangle de cheville puis l'attacher au crochet du support antidérapant (fig.10) ou aux crochets en S (fig. 11) suivant la mise en place choisie.
- Régler la traction à l'aide des fixations auto-agrippantes en les amenant de chaque côté de la cheville et fixer. (fig.12)

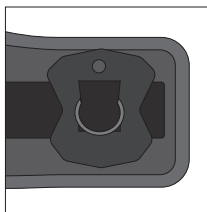


Figure 1

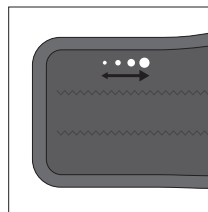


Figure 2

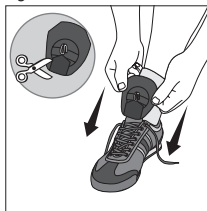


Figure 3

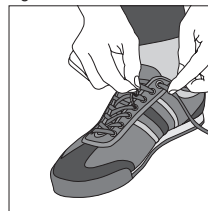


Figure 4



Figure 5

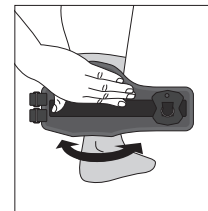


Figure 6

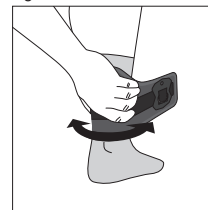


Figure 7

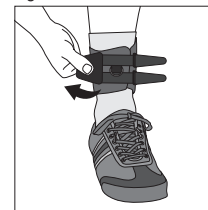


Figure 8

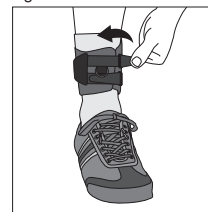


Figure 9

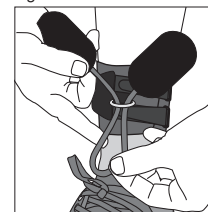


Figure 10

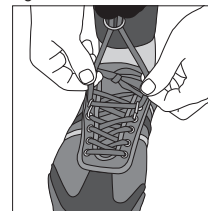


Figure 11

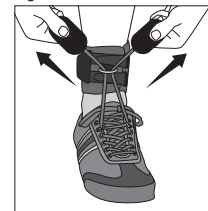


Figure 12