

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

Conduite déconseillée.

ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 40°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



Dispositif médical de classe I

Fabricant et/ou distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT_CollierC3_150625_OrV0_Temp



COLLIER C3

> COLLIER CERVICAL RIGIDE



CONTENU/DESCRIPTION

- Collier C3 rigide avec mentonnière :
- Structure plastique avec plaque perforée pour une bonne ventilation,
 - Structure plastique, bords du collier recouverts d'un capitonnage en simili-cuir,
 - Fermeture par velcro.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

Traumatisme cervical, Entorse moyenne, Névralgies, Cervico-brachiales.

COMPOSITION

- PE 70%,
- PVC 10%,
- Nylon 10%,
- Mousse 5%,
- Coton 5%.

TAILLANT

TAILLE	TOUR DE COU(CM)
1	36 -40
2	41 - 45
3	46 - 50

MISE EN PLACE

- A**
- Ouvrir le collier
 - Positionner le menton au niveau de la section profilée.
- B**
- Fixer le collier à l'arrière du cou à l'aide de la fermeture velcro®.
- C**
- Ajuster le maintien, sans gêner la respiration



CONSULTEZ
LA **VIDÉO**
DE MISE EN PLACE