



Dispositif médical de classe I

Pour la France :

Distributeur : SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France

Tél.: +33 (0)2 99 66 41 41 - Fax : +33 (0)2 99 66 41 31

smeurope@smeurope.fr - www.orliman.fr

LB-I-SMEL124_CeintureSoutienLombaire-OnePlus_V1

All countries :

Fabricante / Fabricant :



ORLIMAN S. L. U.

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobra-L'Eliana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobra de Vallbona Valencia - España (Spain)

Tel.: +34 96 272 57 04 - Fax: +34 96 275 87 00

Tel. Exportación: +34 96 274 23 33

E-mail: orto@orliman.com · Export mail: export@orliman.com

www.orliman.com

LB-I-SME/L124 - Edition : 04/2018



*one***plus**

› CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE



CONTENU/DESCRIPTION

Une ceinture de soutien lombaire One Plus :

- 1 ceinture à fermeture antéro-latérale,
- 1 système de 4 sangles semi-rigides et réglables dont
- 2 avec système de fermeture éclair,
- 1 double bande de rappel postural en tissu élastique avec système de passe-main,
- 4 baleines dorsales en acier galvanisé,
- 3 renforts semi-rigides pour un maintien accru de la zone abdominale,
- 1 système de fixation par micro-velcro®.

Une notice du produit, à lire attentivement.

INDICATIONS

- Lombalgie et lombosciatique.
- Hernie discale.
- Spondylose et spondylarthrose.
- Tension ou déchirure des muscles ou des ligaments soutenant la colonne lombaire.
- Traitement postopératoire et post-traumatique.

COMPOSITION

Tissu postérieur :

- Couche interne : 65% Coton, 28% Polyamide, 7% Élasthanne.
- Couche intermédiaire : 100% Polyuréthane.
- Couche externe : 90% Polyester, 10% Élasthanne.

Tissu antérieur :

- Couche interne : 80% Polyester, 20% Élasthanne.
- Couche intermédiaire : 100% Polyéther.
- Couche externe : 90% Polyester, 20% Élasthanne.

Revêtement tissu des éclisses : 100% Polyester.

Éclisses :

- Postérieures : Acier.
- Latérales et antérieures : Plastique.

Sans latex.

MISE EN PLACE

- 1-Desserrer tous les systèmes de fermetures en retirant les Velcro®, puis ouvrir complètement la fermeture éclair.
- 2-Pour positionner la ceinture dans le bon sens, la double bande de rappel postural doit se trouver dans le haut du dos.
- 3-Placer la ceinture autour du dos, en positionnant les 2 baleinages dorsaux de part et d'autre de la colonne (Fig. 1), puis la passer autour du ventre et la fixer avec le système auto-agrippant latéral.
- 4-Raccrocher la fermeture éclair, la zipper jusqu'en haut puis refermer le cache par-dessus (Fig. 2).
- 5-Ajuster les sangles semi-rigides inférieures, en les fixant dans la région abdominale inférieure. Ajuster ensuite les sangles supérieures semi-rigides au niveau de la région abdominale inférieure (Fig. 3). Les sangles peuvent être raccourcies et découpées en retirant les Velcro® papillon.
- 6-Tirer sur les bandes élastique de rappel postural en utilisant le système de passe-main (Fig. 4) et les orienter vers la zone abdominale inférieure, où elles se fixeront grâce aux Velcro® (Fig. 5 et 6).

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles. En cas d'incident grave en lien avec le dispositif, merci d'en informer le fabricant et l'administration compétente.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.


ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C).
- Rincer soigneusement.
- Laisser sécher à l'air libre.
- Ne pas mettre au sèche-linge.
- Ne pas javelliser.
- Ne pas utiliser de détergent.



Conserver le produit à température ambiante.

Plus d'informations sur www.orlman.fr

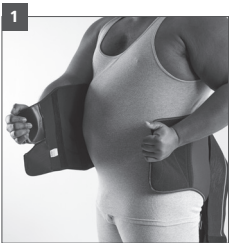

TAILLE	TOUR DE TAILLE (CM)
1	132 - 142
2	142 - 152
3	152 - 162
4	162 - 172