

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ce produit doit être installé et adapté par un professionnel de santé (pharmacien, orthopédiste, kinésithérapeute...).

Consulter immédiatement un médecin en cas de douleurs, de gonflements, de modifications des sensations ou de réactions inhabituelles.

Ne pas porter le produit directement en contact avec une lésion cutanée.

Protéger toute partie du corps où un antalgique a pu être appliqué avant la mise en place du produit.

Il est fortement déconseillé de réutiliser ce produit pour un autre patient.

## ENTRETIEN

- Nettoyage à la main et au savon (max. 30°C),
- Rincer soigneusement,
- Laisser sécher à l'air libre,
- Ne pas mettre au sèche-linge,
- Ne pas javelliser,
- Ne pas utiliser de détergent,



Conserver le produit à température ambiante.



**ORLIMAN.**



Dispositif médical de classe I

Distributeur : SM Europe - 420574626 RCS Rennes

Pour toutes informations complémentaires, contacter :

SM Europe, ZA de la Herbetais, 35520 La Mézière - France.

NOT\_GenuflexROM\_170511\_OrV1

**ORLIMAN S. L. U.**

C/ Ausias March, 3 - Pol. Ind. La Pobla-L'Eliana

Apdo. de correos 49 · C.P.: 46185 - La Pobla de Vallbona

Valencia - España (Spain)

LB-I-SME/LB11 Edition : 05/2017



**GENUFLEX ROM®**

**> ATTELLE DE GENOU ARTICULÉE**



**ORLIMAN.**

## CONTENU/DESCRIPTION

Une attelle de genou articulée Genuflex ROM® :

- 4 réglages distincts à la cuisse (19,5 à 27 cm) et au mollet (22 à 32 cm),
- Fermeture clip à mémoire de réglage,
- 4 enveloppes capitonnées,
- Sangles recoupables avec velcro® papillon,
- Cadran articulé gradué (extension de 0 à 90° graduée, flexion de 0 à 120° graduée et immobilisation totale en flexion de 0 à 45° avec lock).

Une notice du produit, à lire attentivement.

## INDICATIONS

Entorse grave du genou, Per-opératoire, Post-opératoire.

## COMPOSITION

- Nylon 30 %,
- Aluminium 20 %,
- Polyuréthane Mousse 20 %,
- Polyester 20 %,
- POM 10 %,

Sans latex ni phtalate.

## TAILLANT

TAILLE
Unique < 165 cm

## MISE EN PLACE

### A (figure 1)

- Effectuer la mise en place en position assise et régler le produit de préférence sur la jambe non lésée.
- Placer les cadrans articulés au niveau du genou.
- Régler la position des enveloppes capitonnées inférieures (mollet) et supérieure (cuisse) en suivant l'ordre du schéma.
- ① 10 cm entre le capiton et la tête de la malléole. Dupliquer le réglage sur la partie opposée.
- ② 10 cm entre le capiton et l'aîne. Dupliquer le réglage.
- ③ et ④ Positionner les capitons pour un confort optimal.

### B (figure 2)

- Sur la jambe lésée, régler les sangles de serrage : décoller les velcro® papillons, fermer les clips, ajuster le maintien (possibilité de découper les sangles) et fixer à l'aide des velcro® papillon.

### C (figure 3)

- Régler l'angle de flexion et l'extension grâce au cadran articulé.

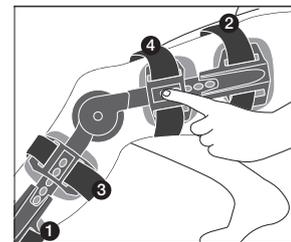


Figure 1

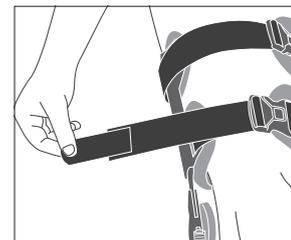


Figure 2

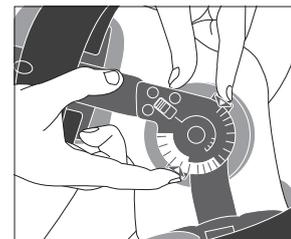


Figure 3



PLUS D'INFOS SUR  
NOS PRODUITS :  
[www.orliman.fr](http://www.orliman.fr)