

GUIDE DE PRISE DE MESURES CHUT

ATTENTION !


Avant d'imprimer ce guide, n'ajustez pas le support à votre imprimante. Vous devez imprimer ces feuillets sur un format A4 à l'échelle 100% pour conserver les mesures réelles.

PROTOCOLE

- 1 • Faites déchausser votre patient.
- 2 • Posez le bloc de prise de mesures au sol, contre un mur et demandez au patient de poser son pied le plus fort sur la feuille, talon collé au mur.
- 3 • Déterminez la pointure du patient.
Si le patient se trouve entre 2 pointures, choisissez la plus grande.
- 4 • Détachez la feuille et à l'aide des mesures imprimées, prenez la circonférence du pied du patient à son endroit le plus large (au niveau des têtes métatarsiennes). Le pied du patient doit être posé au sol, si possible debout.
Si la feuille est trop courte, notez > 29 cm.
- 5 • Notez la (ou les) pointure(s) et la circonférence du pied sur la feuille.
- 6 • Si besoin, recommencez ce protocole pour l'autre pied.
- 7 • Proposez le produit le plus adapté à votre patient en vous référant au tableau de mesures au dos de ce guide.

CONSEILS :

- **En cas de doute entre 2 tailles, toujours prendre la taille supérieure.**
- La largeur du pied est l'élément essentiel de la mesure, avant la pointure.
- Toujours mesurer le pied à ses endroits les plus larges/longs.
- Préconiser l'essayage de la chaussure avec une chaussette ou un bas pour des raisons d'hygiène.

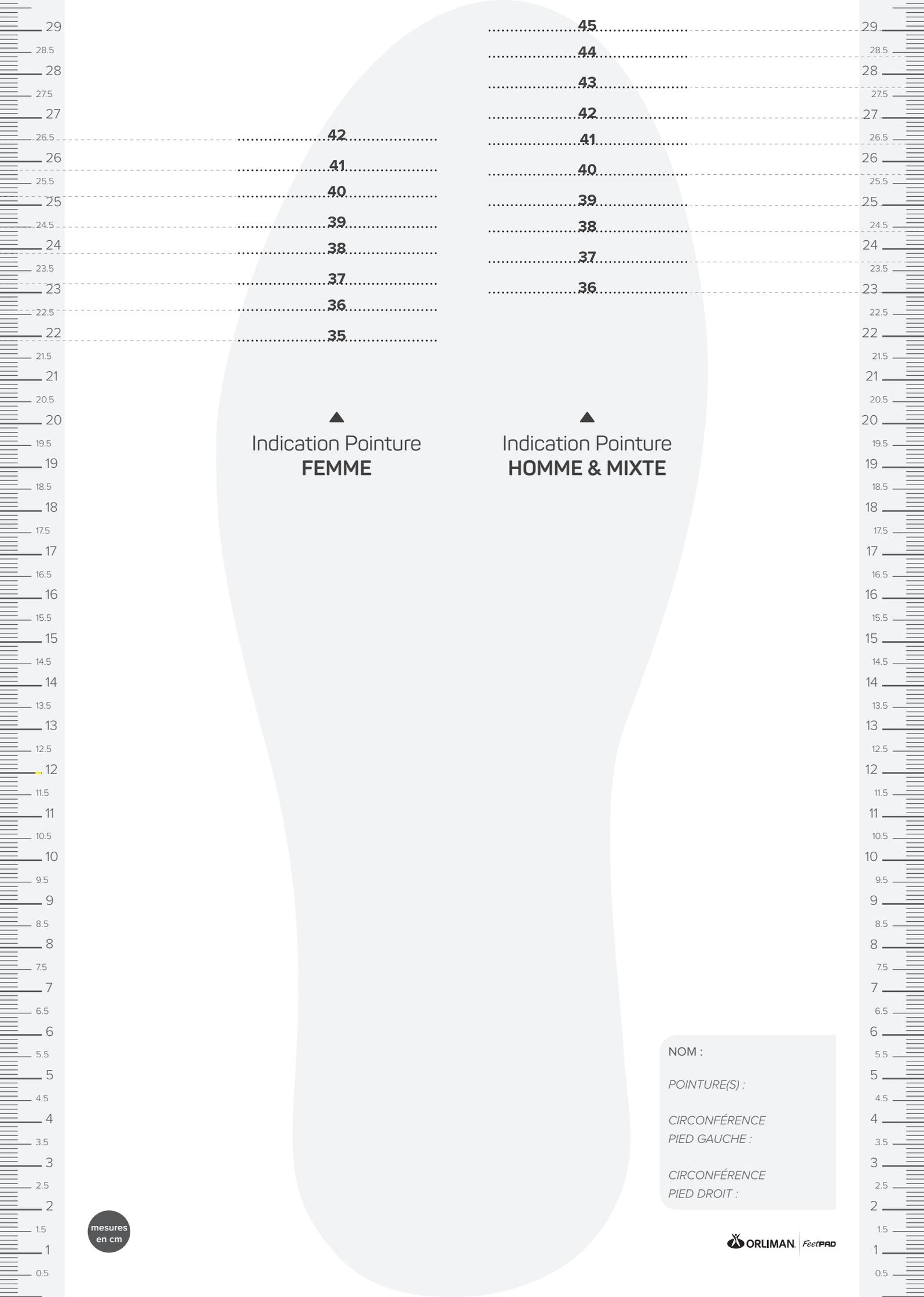

▲
**Indication Pointure
 FEMME**

▲
**Indication Pointure
 HOMME & MIXTE**

42
 41
 40
 39
 38
 37
 36
 35

45
 44
 43
 42
 41
 40
 39
 38
 37
 36

NOM :

POINTURE(S) :

CIRCONFÉRENCE
 PIED GAUCHE :

CIRCONFÉRENCE
 PIED DROIT :

mesures
 en cm

TABLEAU DE MESURES

1 DÉTERMINER LA POINTURE

POINTURE	FEMME		HOMME & MIXTE	
	LONGUEUR DU PIED (CM)			
35	21,9	-	-	-
36	22,6	23	-	-
37	23,2	23,7	-	-
38	23,9	24,4	-	-
39	24,5	25	-	-
40	25,2	25,7	-	-
41	25,8	26,4	-	-
42	26,5	27	-	-
43	-	27,7	-	-
44	-	28,4	-	-
45	-	29	-	-
46	-	29,7	-	-

2 DÉTERMINER LA LARGEUR DU PIED

POINTURE	PIED MOYEN		PIED LARGE		PIED EXTRA-LARGE	
	CIRCONFÉRENCE (CM)					
35	< 22,4	22,5 - 23,5	> 23,5	> 23,5	> 23,5	> 23,5
36	< 22,9	23 - 24	> 24	> 24	> 24	> 24
37	< 23,4	23,5 - 24,5	> 24,5	> 24,5	> 24,5	> 24,5
38	< 23,9	24 - 25	> 25	> 25	> 25	> 25
39	< 24,4	24,5 - 25,5	> 25,5	> 25,5	> 25,5	> 25,5
40	< 24,9	25 - 26	> 26	> 26	> 26	> 26
41	< 25,4	25,5 - 26,5	> 26,5	> 26,5	> 26,5	> 26,5
42	< 25,9	26 - 27	> 27	> 27	> 27	> 27
43	< 26,4	26,5 - 27,5	> 27,5	> 27,5	> 27,5	> 27,5
44	< 26,9	27 - 28	> 28	> 28	> 28	> 28
45	< 27,4	27,5 - 28,5	> 28,5	> 28,5	> 28,5	> 28,5
46	< 27,9	28 - 29	> 29	> 29	> 29	> 29

3 CHOISIR LE MODÈLE

MODÈLE	PIED MOYEN		PIED LARGE		PIED EXTRA-LARGE	
	FEMME					
CÉZEMBRE	•					
BELLE-ÎLE	•					
BRÉHAT	•		•			
ERQUY	•		•			
HOEDIC	•		•			
HOUAT	•		•			
TATIHOU	•		•			
GLAZIC	•		•		•	
BELLE-ÎLE ÉTÉ	•		•		•	
GROIX ÉTÉ	•		•		•	
MOLÈNE	•		•		•	
OLÉRON	•		•		•	
HOMME & MIXTE						
ARZ	•					
RHUVS	•		•			
QUIBERON	•		•		•	
CHAUSEY	•		•		•	
NOIRMOUTIER	•		•		•	
OUessant	•		•		•	



FeetPAD



Les mesures indiquées et le conseil des modèles sont à titre indicatif. En raison de la diversité des pathologies, l'essayage de la chaussure reste le moyen le plus adapté au choix du bon produit.

Document délivré par ORLIMAN®, copie ou reproduction partielle interdite.